

Комуникация с текст с допир – TD Talk в TD Navio

За Европа и други региони (с изключение на Северна Америка и Канада)

Какво представлява TD Talk?

TD Talk е приложение за комуникация, което подкрепя ефективната комуникация със синтезирана реч. Приложението включва QWERTY клавиатура (или най-подходящия еквивалент на всеки език) и позволява предсказване на думи и фрази, учи уникалния Ви стил на общуване и позволява превключване на езици с две докосвания на екрана. Освен това TD Talk поддържа създаването на теми за бърза комуникация, специфични за даден контекст. Всяка Тема предоставя четири Бързи съобщения с едно докосване и 27 съобщения, достъпни чрез страници с Бързи съобщения.

Потребителите на TD Talk на TD Navio имат достъп до клавиатури на над 35 езика, както и до гласове Acapela и Microsoft Neural Voices.

Кой би използвал TD Talk?

Хора, които са:


- Грамотни
- Могат да избират малки бутони (варира в зависимост от размера на екрана) със или без стилус
- Може да изискват известни настройки за докосване
- Могат да плъзгат, за да достъпят менюто с настройки на TD Talk чрез стандартно или модифицирано плъзгане
- Са многоезични и искат бърз достъп до няколко езика

Това може да включва лица с аутизъм, церебрална парализа, афазия, апраксия на речта, дизартрия, ларингит, глосектомия и др.



Как се използва TD Talk в TD Navio с тъч екран?

Основни функции:

- Писане на QWERTY клавиатура (или най-подходящата)
- Докосване на бутони за достъп до бързи съобщения, предсказване на думи и функции

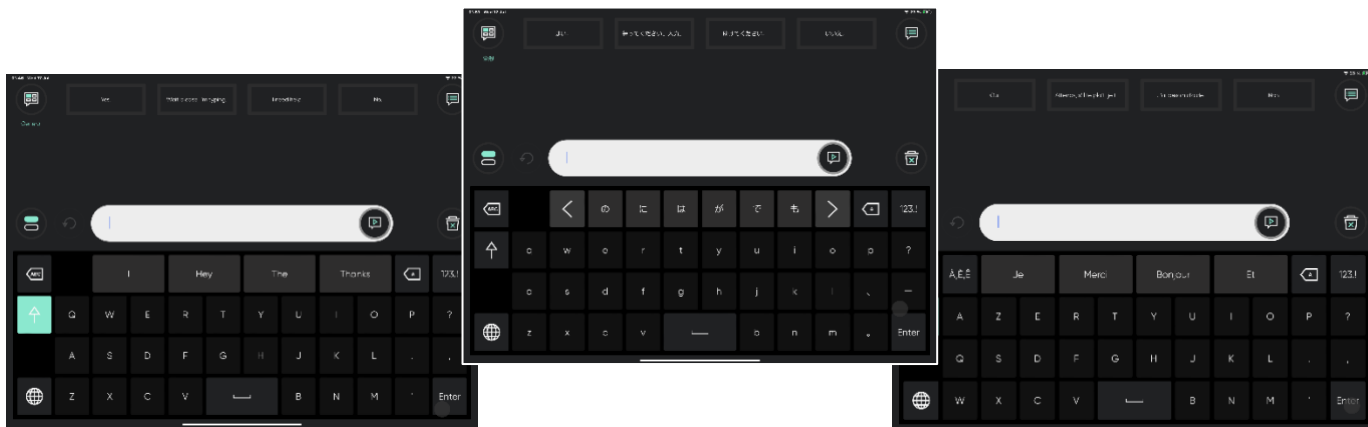

- Двойно докосване върху дума променя предложенията за предсказване на думи
- Докосване преди или след дума позволява вмъкване или изтриване чрез Backspace или Delete
- Двойно докосване или задържане върху дума или празна зона отваря менюто за редакция на iPadOS

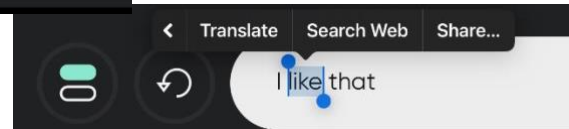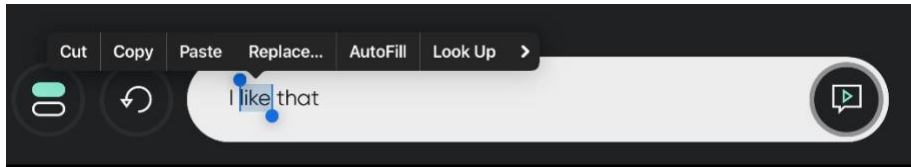

- Съдържанието варира в зависимост от начина на достъп, но може да включва:
 - Изрязване (Cut) – от прозореца за съобщения
 - Копиране (Copy) – в рамките на прозореца за съобщения, в рамките на TD Talk (напр. от прозореца за съобщения към бързо съобщение), от TD Talk към друго приложение за iPadOS
 - Замяна (Replace) – Не оказва влияние върху прозореца за съобщения TD Talk, предлага думи, ако се предположи, че думата, която искате да замените, е била погрешно въведена (напр. *харесваше, Майк, езеро* за *харесваше*)
 - Превод (Translate)– Заменете избраната(ите) дума(и) в прозореца за съобщения с преведени думи на различни езици, копирайте превода и го поставете другаде, изисква се Wi-Fi връзка
 - Споделяне (Share) – Споделяйте избрания текст в прозореца за съобщения чрез различни приложения, копирайте или записвайте във файлове
- Изберете **Изрязване** и **Копиране** за отделни думи или плъзнете точките за вмъкване, за да маркирате избора, след което изберете **Изрязване** или **Копиране**
- Изберете **Вмъкни (Paste)**, за да прехвърлите предварително копиран текст от други приложения в прозореца за съобщения
- Изберете **Замяна**, за да видите и изберете наличните опции за замяна
- Докоснете навсякъде, освен в менюто за редактиране, за да отхвърлите
- Докоснете където и да е в **подказаната фраза**, за да я изберете.
- Плъзнете нагоре от центъра на клавиатурата или бързите съобщения, за да влезете в Настройки на TD Talk, след което докоснете бутоните в настройките

Какви удобства могат да бъдат използвани?

Приложението за настройки на iPadOS предоставя следните възможности за улеснения, които засягат TD Talk.

- Accessibility > Touch > Touch Accommodations
 - Продължителност на задържането
 - Игнориране на повторението
 - Помощ при докосване – Няма, Първоначално докосване, Последно докосване
 - Жестове с плъзгане (променя движението, необходимо за стартиране на жест с плъзгане) са налични, когато е включена опцията Продължителност на задържане.
- Accessibility > Touch > Assistive Touch
 - Докоснете активираното меню, за да завършите определени жестове (напр. плъзгане, достъп до Home)
 - Добавяне на персонализирани жестове
- Звук – Включете или изключете кликванията на клавиатурата
- Капацитивен стилус (не Apple Pencil или Logitech Crayon)
 - Избиране и плъзгане само (без писане или рисуване)
 - Може да се използва в комбинация с докосване на екрана с пръст
 - Добавяне на меню AssistiveTouch, ако някои жестове не могат да се изпълняват със стилус или пръст (напр. плъзгане, продължително задържане)
- Apple Pencil или Logitech Crayon
 - Важно!
 - Не трябва да се изисква достъп до магнитния конектор на iPad за удвояване или зареждане, тъй като той не е наличен в нашите калъфи
 - Вземете такъв, който може да се зарежда с порта USB-C на TD Navio или с кабел USB-C или Lightning и стенен адаптер
 - Може да се използва за писане в прозореца за съобщения на TD Talk
 - Може да се използва в комбинация с докосване на екрана с пръст
 - Добавяне на меню AssistiveTouch, ако някои жестове не могат да се изпълняват със стилус или пръст (напр. плъзгане, продължително задържане)

Кога да изберем TD Snap Text за TD Navio вместо TD Text?

Изберете TD Snap Text ако са нужни:

- Клавиатури с различно разположение (азбучно, AEIOU, честота, двустранна с големи бутони)
- По-големи бутони
- Голям или специфичен шрифт
- Персонализиране на цветовете, размер и оформление
- Лента с инструменти – Бяла дъска, Снимки, Визуална подкрепа
- Език иврит – базиран на символи, с клавиатура и предсказване
- Достъп до съобщения с предварително записан текст
- Комуникация чрез символи вместо само текст и правопис